


Термоножи для обрезания гуттаперчи

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

C-BLADE

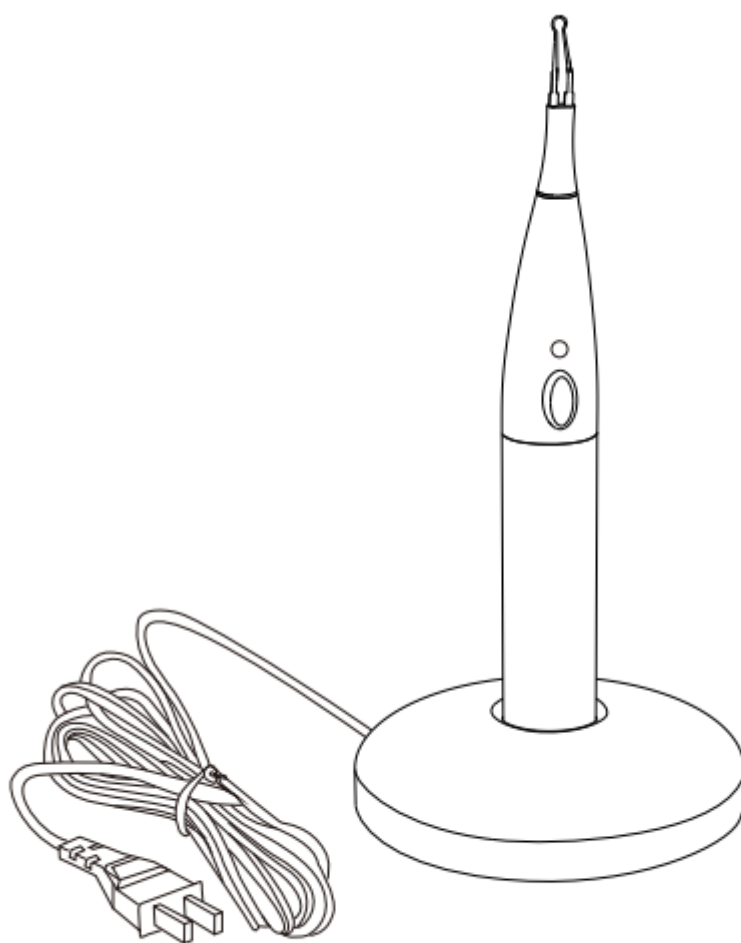

CE

Меры предосторожности

 Для надлежащей работы с данным оборудованием тщательно изучите настоящее руководство пользователя, прежде чем приступить к применению данного оборудования

1. До применения данного оборудования тщательно изучите настоящее руководство.
2. Используйте настоящее оборудование в соответствии с его целевым применением. Производитель освобождается от любого рода ответственности в случае, если оператор не выполняет инструкции при работе с данным оборудованием либо использует его в иных целях.
3. При использовании внешнего источника электропитания убедитесь в том, что напряжение в электросети соответствует диапазону, указанному на маркировке изделия, во избежание причинения вреда здоровью оператора или пациента.
4. Не прикасайтесь к губам, деснам, слизистым оболочкам, мягким тканям пациента, чтобы не обжечь оператора или пациента. Изделие подлежит использованию вне полости рта пациента.
5. Не допускайте контакта нагретой рабочей части насадки с горючими газами или жидкостями, в противном случае, возникнет риск возгорания.
6. Запрещено использовать данное оборудование в присутствии легковоспламеняющихся газов.
7. Не погружайте оборудование в жидкости.
8. В случае любой утечки из оборудования, немедленно прекратите его применение и обратитесь к производителю или авторизованному дилеру с целью последующей утилизации.
9. Применять с осторожностью у пациентов с болезнями сердца, беременных женщин и детей.
10. Данное оборудование предназначено для применения исключительно специалистами.

Стандартная комплектация

Ручка термоножа для обрезания гуттаперчи	1
База зарядного устройства	1
Комплект насадок (4 штуки)	1

Целевое применение

Данное изделие может применяться только хорошо подготовленными стоматологами в условиях стоматологического кабинета и предназначено для обрезания излишка гуттаперчевого штифта в ходе выполнения процедур по пломбированию корневых каналов.

Противопоказания

Запрещено применение у лиц с имплантированным кардиостимулятором или другой системой!

Инструкции

До начала зарядки убедитесь в том, что напряжение в электросети соответствует требованиям к данному оборудованию.

Зарядка

1. Сначала подсоедините зарядное устройство к источнику электропитания.
2. Установите инструмент в базу зарядного устройства, когда инструмент установлен в базу зарядного устройства, на ручке включается световой индикатор.

Использование батареи

1. Перед первым применения инструмента убедитесь в том, что он полностью заряжен.
2. Не заряжайте батарею с выработанным ресурсом.
3. Для полной зарядки требуется более 12 часов.

Операции в процессе работы

1. Насадка крепится на ручку, верхняя изогнутая часть направлена в противоположную сторону от кнопки на ручке, что облегчает работу.
2. Насадки должны устанавливаться в ручку в холодном состоянии (не нажимать на кнопку во время установки), используйте изогнутую часть насадки для обрезки гуттаперчи.
3. Убедитесь в надежности фиксации насадки, прежде чем приступить к работе. Чистка: После нескольких секунд нагревания насадка легко очищается.
4. После того как гуттаперча обрезана, отпустите кнопку, дождитесь, пока насадка остынет, прежде чем убрать ее от зуба пациента. Рабочая кнопка является «контактной», т.е. инструмент прекращает работать, когда кнопка отпускается.

Меры безопасности

1. Когда насадка установлена на ручку, не гните ее.
2. Приложение чрезмерного усилия во время процедуры приведет к сокращению срока эксплуатации насадки.
3. Избегайте воздействия электромагнитных помех.
4. Не вносите никакие изменения в конструкцию инструмента.

Повседневный уход

1. Нагреваемые насадки подлежат чистке, дезинфекции и стерилизации до и после применения у каждого пациента.
2. Если насадка не генерирует тепло, немедленно прекратите работу и проверьте состояние насадки. Если выявлен какой-либо дефект, своевременно замените на новую насадку.
3. Если индикатор зарядки не загорается в процессе зарядки, проверьте подсоединение базы к источнику электропитания.
4. Допускается высокотемпературная стерилизация и автоклавирование насадки до 25 раз; продолжительность одного цикла стерилизации при 134 °C – не менее 5 минут.

Чистка, дезинфекция и стерилизация

Чистка

1. При помощи ватного тампона удалите остаток стоматологического геля с рабочей поверхности насадки.
2. Погрузите в ферментное чистящее средство на 5 минут после полоскания.
3. После замачивания промойте мягкой водой, затем протрите гигроскопичной тканью, чтобы удалить все остатки влаги.

Дезинфекция

Используйте дезинфицирующее средство, не содержащее хлор, для дезинфекции насадки протиранием. Рекомендуется использовать дезинфицирующее средство, антиковидного действия.

Сушка

После чистки и дезинфекции выполните сушку, для сушки рекомендуется продувка сжатым воздухом.

Стерилизация

1. Стерилизуемые части: насадки.
2. Перед стерилизацией упакуйте в стерилизационный пакет, отвечающий соответствующим национальным требованиям к упаковке.
3. Способ стерилизации: высокотемпературная паровая стерилизация.
4. Условия стерилизации: 134 °C в течение не менее 5 минут.

Пояснения к гарантии

Являясь производителем, мы несем ответственность за дефектное изделие, если такой дефект связан с материалом изготовления или процессом производства и был выявлен в течение 1 года действия гарантии.

Срок гарантии на основной блок данного оборудования составляет 12 месяцев, на батарею – 6 месяцев.

Мы не будем нести ответственность за любого рода ущерб, причиненный вследствие действий неуполномоченной третьей стороны!

Условия окружающей среды при эксплуатации, транспортировке и хранении

Условия окружающей среды при эксплуатации

Температура окружающей среды:	+5 °C – +40 °C
Относительная влажность:	20 % – 80 % ОВ
Атмосферное давление:	86 кПа – 106 кПа

Условия транспортировки и хранения

Температура окружающей среды:	-10 °C – +55 °C
Относительная влажность:	≤ 93 % ОВ
Атмосферное давление:	50 кПа – 106 кПа

Технические данные

1. Размер ручки: длина: 126 мм, Ø: 19 мм
2. Напряжение электропитания: 230 В / 50 Гц или 110 В / 60 Гц
3. Потребляемая мощность: 5 ВА
4. Защита от поражения электрическим током: Тип В

Переработка и утилизация



Утилизируйте использованное оборудование в соответствии с правилами, нормами и стандартами вашей страны (региона).
Не допускайте загрязнения отходами в процессе утилизации.

Символы



Предостережение



Внимание!



Верх здесь!



Осторожно! Хрупкий груз



Предохранять от влажности!



Особая утилизация отходов электрического и электронного оборудования (Директива WEEE)



Заводской номер



Производитель



Оборудование Класса II (адаптер)



Смотреть Руководство пользователя / буклет



Рабочая часть Типа В



Только для использования внутри помещения



Постоянный ток



Маркировка соответствия требованиям ЕС



Представитель в Европейском Союзе



Изделие медицинского назначения



Фошань КОКСО Медикл Инструментс Ко., Лтд.

№ 17, пр. Гуанминь, Индустриальная зона «Источник нового света»,
Парк высоких технологий района Наньхай, г. Фошань 528226, провинция Гуандун,
Китайская Народная Республика

E-mail: coxotec@163.com

Http: www.coxotec.com



Лотус НЛ Б.В.

Площадь Королевы Юлианы 10, 1-ый этаж, 2595АА Гаага, Нидерланды

E-mail: peter@lotusnl.com

Версия 2.5 Дата пересмотра: 17.07.2023 г. АЕ0449