

ProGlass™ Plus Cem

Рентгеноконтрастный, модифицированный композитом, стеклоиономерный цемент для фиксации

Продукт ProGlass™ Plus Cem представляет собой самоклеящийся композитный цемент для фиксации, двойного отверждения. Продукт не требует предварительной обработки и легкоудаляем. Продукт ProGlass Plus Cem – универсальный цемент для фиксации, который обладает значительной силой адгезии и пригоден для разностороннего использования в повседневной работе.

Для применения только специалистами в области стоматологии по рекомендованным показаниям.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цементирование керамических, металлических или композитных вкладок, накладок, коронок, мостов, штифтов и винтов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях продукт может вызвать гиперчувствительность у отдельных пациентов. В случае возникновения таких аллергических реакций прекратите применение продукта и обратитесь к врачу.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Фторированный силикат бария, пирогенный диоксид кремния, бис-гликольметакрилат, 10-метакрилоксидекил дигидрофосфат, диметакрилат, гидроксиэтилметакрилат, катализатор, стабилизаторы, пигментные красители

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка

- Удалите временные реставрации и какие-либо остатки с поверхности зуба.
- Очистите препарируемую область при помощи пемзы и воды. Тщательно прополощите.
- Удалите с поверхности всю влагу воздухом, не содержащим масла, или при помощи ватного тампона. Не пересушивайте.
- Проверьте посадку реставрации.

Предварительная подготовка реставрации

Следуйте инструкциям производителя по применению реставрационного материала.

Интервалы рабочего времени

Время	Мин:сек
Смешивание	00:20
Время обработки	02:00 ± 30
Фотополимеризация	00:20
Отверждение	≤ 05:00

*продолжительность обработки и отверждения может быть сокращена или увеличена в зависимости окружающих условий

Нанесение продукта ProGlass Plus Cem

Перед первым применением вдавите небольшое количество продукта ProGlass Plus Cem из шприца.

1. Перенесите цемент на бумагу для смешивания и перемешайте при помощи лопатки. В случае применения смесительного наконечника типа «auto-mix» используйте смесительный наконечник и/или интраоральный наконечник. Для цементирования ортодонтических брекетов протравите поверхность зуба кислотным травителем.
2. Равномерным слоем нанесите приготовленную смесь на всю полость или заполните цементом коронку.



(подпись) *штамп [Silmet Ltd.]*

3. Надежно и стабильно установите реставрацию таким образом, чтобы цемент мог полностью отвердеть.
4. После установки реставраций в обрабатываемой области удалите излишек цемента при помощи скалера или стоматологического зонда до полного отверждения.

Рекомендуется:

- Удалять излишек цемента, пока материал находится в желеобразном состоянии. Как правило, следует удалить цемент после светоотверждения (приблизительно в течение 1 ~ 3 минут). Перед работой советуем проверить необходимое время светоотверждения излишка цемента, выполнив фотополимеризацию небольшого количества цемента на бумаге для смешивания.
 - В случае самоотверждения удаляйте излишек цемента в желеобразном состоянии приблизительно через 2 минуты после начала смешивания. Продолжительность сохранения желеобразного состояния может зависеть от температуры полости рта и/или окружающей среды.
5. После удаления излишка цемента выполняйте фотополимеризацию со всех сторон при интенсивности света 400 мВт/см² - каждые 20 секунд, при интенсивности света 1 000 мВт/см² - каждые 10 секунд.
 6. Удалите излишек цемента при помощи стоматологического зонда. Выполните финишную обработку проксимальных участков при помощи финишных штрипов. Выполните финишную обработку при помощи лакировочных дисков, финишных чашек и наконечников.
 7. Проверьте окклюзию.

СРОК ГОДНОСТИ

На продукте указаны номер партии и дата истечения срока годности. Не использовать по истечении срока годности.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Не допускайте применения данного продукта у пациентов с известной аллергией на метакрилаты. В случае длительного контакта с мягкими тканями полости рта обильно прополощите рот водой.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Надевайте защитные перчатки, также рекомендуется бесконтактная техника выполнения процедур. Акрилаты могут проникать сквозь материал перчатки. В случае контакта продукта с перчаткой, снимите и утилизируйте перчатку, незамедлительно вымойте руки водой с мылом и снова наденьте перчатки. В случае возникновения аллергической реакции обратитесь за соответствующей медицинской помощью.

Стоматологические материалы, содержащие эвгенол, не должны применяться совместно с данным продуктом, так как они могут повлиять на отверждение и вызвать размягчение полимерных компонентов продукта.

ВНИМАНИЕ

Федеральным законодательством США продажа или использование данного изделия разрешены только специалистам в области стоматологии или по их заказу.

Уведомление в ЕС: О любых серьезных происшествиях, связанных с применением данного изделия, следует уведомить производителя и компетентный орган в стране-члене ЕС по месту пребывания пользователя и/или пациента.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в прохладном и темном месте, при комнатной температуре (5 - 24 °C / 41- 75,2 °F), защищенным от прямых солнечных лучей.

Информация об утилизации и безопасности продукта содержится в Паспорте безопасности вещества (доступен по адресу: www.silmetdental.com или у местного представителя производителя).

ГАРАНТИЯ

Компания Silmet Ltd. обязуется заменить продукт в случае подтверждения его дефектности. Компания Silmet Ltd. не несет ответственность за любые потери или ущерб, прямые или косвенные, возникшие вследствие применения или неспособности применить вышеописанный продукт. До использования продукта стоматолог должен определить пригодность продукта для целевого применения. Все риски и ответственность, связанные с таким применением, возлагаются на стоматолога.



(подпись) утамп [Silmet Ltd.]

СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИИ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

французском, немецком, испанском итальянском:

www.silmetdental.com/downloads/downloads_instruction



Производитель:

Силмет Лтд. [Silmet Ltd.]

Ул. Хассадна, 12 Ор-Йегуда, 6022011, Израиль

Тел.: 972-3-7353000, Факс: 972-3-5331581 info@silmet.co.il, www.silmetdental.com



Представитель в ЕС:

Обелис с.а. [Obelis s.a]

Бульвар Генерала Вай, 53 1030 Брюссель, Бельгия

Тел.: + (32) 2.732.59.54 Факс: + (32) 2.732.60.03, E-Mail: mail@obelis.net



67PCU Версия 0 03.2023