

Разрешен к применению на территории № ФСЗ 2009/05712

Фторидосодержащий лак для лечения гиперчувствительности зубов

Описание материала:

Bifluorid 10 представляет собой быстросохнущую стоматологическую суспензию с хорошей адгезией к сухой эмали и дентину. Благодаря этому возможна хорошая герметичность дентинных канальцев на длительный срок.

Bifluorid 10 образует водостойкую изолирующую пленку, защищающую от термических и химических воздействий.

1 г **Bifluorid 10** содержит:

50 мг фторида натрия (соответствует 23 мг фторида) и

50 мг фторида кальция (соответствует 24 мг фторида)

Показания к применению:

Лечение всех видов чувствительности (гиперсенсibilизация дентина), напр.:

- у шейки зуба и края коронки
- после профессиональной чистки зубов и удаления зубного камня
- после препарирования и шлифровки поверхности зуба
- при стертых жевательных поверхностях и при наличии кляммеров;
- после повреждений зубной эмали (изломы, сколы)
- герметизация краев полостей после постановки пломбы, особенно после применения техники травления
- в качестве защиты дентина / прокладки под амальгамные пломбы

Противопоказания:

Bifluorid 10 содержит эвгенол. Следует отказаться от применения **Bifluorid 10** при наличии гиперчувствительности (аллергии) к этим компонентам.

Целевая группа пациентов:

Bifluorid 10 разрешен к применению у всех пациентов без ограничений по полу и возрасту.

Характеристики материала:

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

Пользователь:

Bifluorid 10 должен использоваться профессионально подготовленным в области стоматологии специалистом.

Применение:

1. Подготовка

Поверхности, требующие лечения, очистить и основательно просушить воздухом.

2. Забор

а) флакон

Встряхивать **Bifluorid 10** перед каждым использованием. Твердые частички должны быть равномерно распределены в суспензии. Достаточный объем флакона и два металлических шарика облегчают встряхивание.

Нанести **Bifluorid 10** по каплям на аппликатор, а лучше на поролоновые тампончики **Пеле Тим**. Флаконы с **Bifluorid 10** после применения снова плотно закрыть.

б) SingleDose (Унидоза)

Отделить *SingleDose* (Унидозу) по линии перфорации и повернуть вверх стороной с напечатанным текстом.

С помощью **Single Tim** проткнуть фольгу, расширить отверстие и круговым движением смочить кисточку жидкостью.

3. Аппликация

Поверхность тушировать **тонким** слоем. Внимание! Слишком толстый слой легко снимается. Дать фторлаку впитаться в течение 10 - 20 с и просушить воздухом. При правильном нанесении и регулярной гигиене полости рта (**не чистить зубы в течение 12 - 24 часов после нанесения**)

Bifluorid 10 остается на покрытых поверхностях в течение нескольких дней. При наличии гиперчувствительных шеек зубов, краев коронок или аналогичных показаний процедуру повторить два-три раза с интервалом в 7 дней. При этом поверхность только сушить и снова тушировать.

Указания, меры предосторожности:

- Для лиц, у которых отсутствует контроль глотательного рефлекса (дети дошкольного возраста, инвалиды), применять **Bifluorid 10** с особой осторожностью.
- После нанесения **Bifluorid 10** приостановить на несколько дней систематический дополнительный прием фторидов (таблетки фторида или фторированная пищевая соль).
- При неправильном применении (см. раздел «Применение») в полости рта может образоваться избыток фторидов. Проглатывание большого количества может вызвать тошноту, рвоту, понос. Регулярное превышение ежедневной нормы потребления фторида (системно и местно) более 2 мг в период развития зубов может привести к нарушению минерализации зубной эмали. Это нарушение, обозначенное как дентальный флюороз, характеризуется появлением пятен на зубной эмали.
- **Bifluorid 10** должен быть жидкотекучим, так чтобы после встряхивания материал свободно вытекал из крышки-капельницы.
- **Растворитель** использовать для очистки инструментов и т.д.
- Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

Хранение:

Хранить **Bifluorid 10** в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре в 4 °C - 23 °C. Не использовать после истечения срока годности.

Утилизация:

Материал необходимо утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

Обязательное извещение:

Обо всех серьезных побочных происшествиях, таких как смерть, серьезное ухудшение состояния здоровья пациента пользователя или других лиц в течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезной угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти в связи с применением **Bifluorid 10**, следует сообщать в компанию VOCO GmbH и в компетентные органы.

Last revised: 2021-06

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

