

**Инструкция по применению медицинского изделия
«Kagayaki® Mira»
«Kagayaki® MiraZr»
Паста стоматологическая шлифовальная**

Область применения:

Применяются в стоматологических отделениях клиник, больниц, поликлиник и стоматологических кабинетах в области терапевтической, ортопедической и зуботехнической стоматологии.

Назначение пасты *Mira*:

Предназначена для профессиональной чистки зубов перед изготовлением композитных реставраций, для снятия зубных отложений, пигментаций, не повреждая эмали, а также применяется для предварительного шлифования композитных реставраций.

Состав *Mira*: Силикаты (кремнезем), эксципиент, эфирные масла.

Назначение пасты *MiraZr*:

Предназначена для профессиональной чистки зубов перед изготовлением композитных реставраций, для снятия более плотных зубных отложений, пигментаций, не повреждая эмали, а также применяется для предварительного шлифования композитных реставраций.

Состав *MiraZr*: Силикаты (кремнезем), цирконий, эксципиент, эфирные масла.

Показания к применению:

Удаление зубных отложений, пигментаций, шлифование пломб.

Противопоказания:

Изделия не следует применять, если известно, что у пациента были аллергические реакции на любой из перечисленных в составе компонентов.

Побочные действия:

Побочные действия при применении в соответствии с инструкцией по эксплуатации не выявлены.

Пошаговая инструкция:

- Удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки пасты *Mira/Mira ZR*.
- Вскройте упаковку.
- Возьмите на шпатель необходимое количество пасты и нанесите на инструмент для полировки.
- Плотно закройте емкость сразу же после использования.
- Проведите обработку поверхности в соответствии с инструкцией по применению инструмента.
- Во избежание перегрева или разбрызгивания пасты, при работе не превышайте рекомендованную в инструкции по применению инструмента скорость.
- После использования смойте пасту водой.

Меры предосторожности:

- Изделия предназначены исключительно для профессионального использования в стоматологии, в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда и техники безопасности, а также в соответствии с требованиями данной инструкции по эксплуатации.
- При применении данных продуктов необходимо находиться в защитных очках.
- В течение всего процесса полировки паста должна присутствовать на инструменте во избежание перегрева обрабатываемой поверхности.
- Не используйте изделие по истечении срока годности.

Условия хранения и транспортирования:

Хранение изделий осуществляется в закрытых помещениях при температуре воздуха в пределах от +5°C до +25°C, при относительной влажности не более 80 %, в местах, защищенных от загрязнений, химикатов, нагрева, возможности механических повреждений. Изделия не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Транспортирование изделий производится всеми крытыми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта (ГОСТ 15150, условия транспортирования). Ненадлежащие условия могут сократить срок годности и привести к повреждению продукта.

Утилизация:

Отходы, образующиеся в результате использования изделий, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, относятся к медицинским отходам класса А. Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация должны осуществляться с соблюдением требований СанПиН 2.1.3684-21.

Гарантии изготовителя:

Производитель гарантирует соответствие выпускаемого продукта требованиям нормативной и технической документации при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Комплектация:

- 1) Паста одного варианта исполнения:
 - Mira: банка пластиковая 45 г -1шт.;
 - MiraZr: банка пластиковая 50 г – 1 шт.;
 - MiraZr: туба пластиковая 120 г – 1 шт.;
 - MiraZr: мини-упаковка блистер 2 г - 100 шт.
- 2) Инструкция по применению - 1 шт.

Варианты упаковки паст (банка пластиковая/ туба пластиковая/ мини-упаковка блистер пластиковый)**Номер партии и срок годности:**

Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке (этикетке и шве тубы).

Номер партии указан на упаковке (этикетке и шве тубы).

Артикул указан на упаковке.

Пасты стоматологические шлифовальные по ТУ 32.50.11-001-61085772-2016.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018 / 7249 от 04.05.2022 года.

Жалобы и рекламации направлять: e - mail: info@kagayakipolish.com










Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Кагаяки» (ООО «Кагаяки»),
Юридический адрес: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Остров Декабристов, ул. Уральская, д.13, литера. И, помещ. 1Н, офис 101, раб. место 2.

Место производства: Россия, 175430, Новгородская обл., г. Валдай, пр-д Крестецкий ,зд. 1.

www.kagayakipolish.com

301-03-И_V.004 от 11.2023 г.

	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению		
	Диапазон влажности		Температурный диапазон
	Обратитесь к инструкции по применению		Производитель
	Номер партии		Дата изготовления изделия
	Не допускать воздействия солнечного света		Использовать до

