

Es Temp. EsTemp NE.

Цементы для временной фиксации ортопедических конструкций.



Es Temp – серия цементов на основе оксида цинка для временной цементировки ортопедических конструкций. Безэвгенольный вариант – EsTemp NE, вариант на основе эвгенола – EsTemp. Не оказывает влияние на ортопедическую реставрацию.

Показания для использования:

- Временная фиксация ортопедических конструкций.

Характеристики материала:

- Легкость в использовании и при замешивании.
- Вариант без эвгенола – обладает приятным запахом лимона, гипоаллергенный, не раздражает слизистую оболочку полости рта.
- Высокая прочность связывания – более 5 МПа.
- Может использоваться даже при низких значениях толщины пленки – менее 8 мкм.
- Есть возможность использования двух типов насадок – экономичной (Eco Tip) и автосмешивающей (Auto Mix).
- Рабочее время – 1 минута 30 секунд, полная полимеризация через 5 минут.

Способ применения:

1. Выбрать подходящий тип временного цемента – EsTemp NE (без эвгенола), EsTemp (с эвгенолом).
2. Выдавить полоски базы и катализатора на блокнот для замешивания, или одеть автосмешивающую насадку на шприц (Auto Mix).
3. Высушить отпрепарированные зубы и внутреннюю поверхность ортопедической конструкции.
4. Тщательно смешайте две полученные равные порции материала на блокноте в течение 20 секунд – если используете экономичную насадку (Eco Tip).
5. Нанести цемент на внутреннюю поверхность реставрации. Рабочее время в полости рта составляет 1,5 минуты. Полная полимеризация наступает через 5 минут.
6. Плотно установить конструкцию в полости рта.
7. Проверить окклюзию.
8. Убрать излишки цемента после начала его затвердевания (4-5 минут от начала замешивания).

Возможные варианты комплектации:

Es Temp:

- 10г X 2 шприца.

- Блокнот для замешивания.
- Насадки Eсо Tips.

Es Temp NE:

- 10г X 2 шприца.
- Блокнот для замешивания.
- Насадки Eсо Tips.

Меры предосторожности

1. Избегайте контакта с глазами. В случае попадания на кожу или в глаза, промойте несколько раз водой и затем при необходимости обратитесь к специалисту.
2. Только для профессионального использования в стоматологии.
3. Не использовать после окончания срока годности.

Хранение

1. Хранить в прохладном сухом месте (2 °С-27 °С)
2. Не превышать температуру хранения, не допускать попадания прямого солнечного света.
3. Закрывайте колпачки после использования.
4. Срок годности составляет 2 года со дня даты производства.

Побочные эффекты

В редкий случаях может вызвать сенсibilизацию у пациентов с гиперчувствительностью к одному из компонентов материала. В этом случае прекратить использование материала у данного пациента.