

compact lab putty

Силиконовая оттискная масса для использования в зуботехнической лаборатории, конденсационная

Особенно пластичная начальная консистенция, **высокая конечная твердость** (по Шору 90А), термостойкость. Подходит для разнообразных целей применения (надёжная фиксация искусственных зубов, окклюзионные валики, модели, изоляция и т. д.). Время обработки и отверждения меняется в зависимости от индивидуальной дозировки катализатора. Точная передача деталей, стабильность формы и объема.


Дозировка и смешивание

Заполните мерную ложку массой **compact lab putty**. Добавьте катализатор согласно инструкции по дозировке. Размесите массу и катализатор так, чтобы получилась гомогенная смесь однородного цвета (ок. 30 с).



Важные указания по обработке

- Исключительно для **внеротового** использования квалифицированным персоналом в стоматологии.
- Избегайте контакта с аддитивными силиконами.
- Запрещено извлекать материал руками, запрещено использовать латексные перчатки.
- Время отверждения сокращается при слишком большом количестве катализатора и повышенной температуре и увеличивается при недостаточном количестве катализатора и пониженной температуре.
- Сразу же после использования надёжно закройте бутылочку/тюбик с катализатором.
- Отвержденная слепочная масса устойчива к химическим реагентам – избегайте загрязнения одежды.
- Избегайте попадания катализатора в глаза. Это может вызывать раздражение. При необходимости сразу же тщательно промойте глаза водой, незамедлительно обратитесь к офтальмологу.

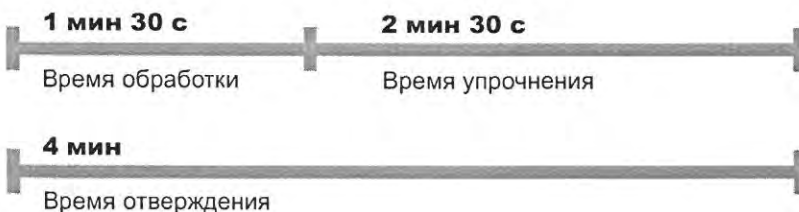

DETAX

GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany (Германия)
Телефон: 07243/510-0 · Факс: 07243/510-100
www.detax.de · post@detax.de



Произведено
в Германии

IM05

06/2019

DETAX
GmbH & Co. KG Carl-Zeiss-Str. 4
76275 Ettlingen Tel. 07243. 510-0

RU

Инструкция по применению

Области использования

- Обычные показания к применению для лабораторных оттисковых масс
- Изготовление небольших сегментов модели

Технические характеристики

- **Дозировка:**
1 мерная ложка: 10 капель catf
1 мерная ложка: 6 см catp
- **Цвет продукта:** серый
- **Время размешивания:**
ок. 30 с*
- **Время обработки:**
ок. 1 мин 30 с*
- **Время отверждения:**
ок. 4 мин*
- **Конечная твердость:**
по Шору 90А
- **Линейное изменение размеров:**
< 0,5 %
- **Обработка:** при 23 °C ± 2 °C,
50 ± 5 % отн. влажности воздуха
- **Хранение:**

15 °C
59 °F

25 °C
77 °F



* С момента начала смешивания при 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % отн. влажности воздуха. Указанное время уменьшается при более высокой температуре и увеличивается при более низкой температуре.

Информация для заказа

Стандартная упаковка 02410
5400 мл (8 кг) основы,
пластмассовое ведро
2 ложки для дозировки

Жидкий cat compact 02296
Бутылочка 50 мл

Жидкий cat compact 02126
5 бутылочек по 50 мл

Комплект Eco-Set 02465
5400 мл (8 кг) основы,
пластмассовое ведро
2 ложки для дозировки
3 x 50 мл cat compact,
жидкость, бутылочки

Комплект Eco-Set 02797
5400 мл (8 кг) основы,
пластмассовое ведро
2 ложки для дозировки
3 x 25 мл cat compact,
паста, тюбик

Паста cat compact 02823
Тюбик 25 мл