

ВОСК БАЗИСНЫЙ



Показания для применения:

- моделирование базисов съемных протезов;
- изготовление прикусных шаблонов с окклюзионными валиками;
- изготовление индивидуальных ложек и ложек-базисов;

Преимущества:

- обладает высокой пластичностью;
- легко формуется;
- хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь;
- полностью без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм;

Инструкция по применению:

- пластинку воска размягчают, равномерно разогревая ее над пламенем горелки или в теплой (45-50) °C воде;
- температура плавления и застывания воска (55 ± 3) °C;
- воск моделируют любыми зуботехническими инструментами;

Комплектность: пластины 500г.