

**BARBED BROACHES**

30mm  
Stainless steel  
Made in Russia



GTM Solution GmbH  
Overather Str. 56-52 D-51429  
Bergisch Gladbach, Germany  
Tel.: +49(0) 2204 98 771-0  
E-mail: info@gtm-solution.com

12, Sakin Saksayev street, Kazan,  
Republic of Tatarstan, 420021, Russia  
Tel.: (843) 221-935-00  
R@kmi3group.ru  
www.kmi3group.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
Россия, 420021, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Салиха Саядашева, д. 12  
Тел./факс: (843) 221-935-00

Общая длина 30 мм / Total length 30 mm  
Оперативная длина 20 мм / Length of operating part 20 mm

№/ Обозначение номинального размера/Rated deviation

№0	№1	№2	№3	№4	№5	№6
020	025	030	035	040	050	060

**КОМПЛЕКТ/SET**

№/ кол. шт. / pcs.						
№1	№2	№3	№4	№5		
025	030	035	040	050		
50	150	150	100	50		



**ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ ПЭ-«КМИЗ»**

по ТУ 9434-083-05519988-2002



30mm

Сталь нержавеющей «Н»  
Сделано в России

500 pcs.

ОТК 14-67

Рег. удостоверение  
№ФСР 2010/08019  
от 02.11.2017 г.

LOT



**ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ ПЭ "КМИЗ"  
BARBED BROACHES**

**НАЗНАЧЕНИЕ: PURPOSE:**

Одноразовое удаление пульпы из корневого канала зуба  
Onetime pulp removing form the root canal

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ: STERILIZATION:**

Метод дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации - по (МУ 287-113)

Режим/Regime	Стерилизация/ Sterilization
Среда/Environment	Сухой горячий воздух/ Hot dry air
Температура/ Temperature	180 <sup>+2</sup> -10 °C
Время/ Time	60 <sup>+5</sup> минут min.
АССОРТИМЕНТ:	CHOICE:

Пульпоэкстракторы ПЭ "КМИЗ" изготавливаются семи номеров.  
BORBED BROACHES are produced of seven numbers.

№/Обозначение номинального размера

№0	№1	№2	№3	№4	№5	№6
020	025	030	035	040	050	060

Общая длина пульпоэкстрактора ПЭ "КМИЗ" L=30мм.  
Length borbet broaches-30mm.  
Материал пульпоэкстрактора - нержавеющая сталь  
Stainless steel

<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	<b>STORAGE:</b>
В упаковке Температура 5...40°C Влажность 0...80%	In package Temperature 5...40°C Himidity 0...80%
<b>ГАРАНТИИ:</b>	<b>WARRANTY:</b>



Гарантийный срок хранения -5 лет.  
The warranty period for reamers in stock is 5 years.

**ТУ 9434-083-05519988-2002**



Handwritten signature and date: 17.03.21

71x 53x 41

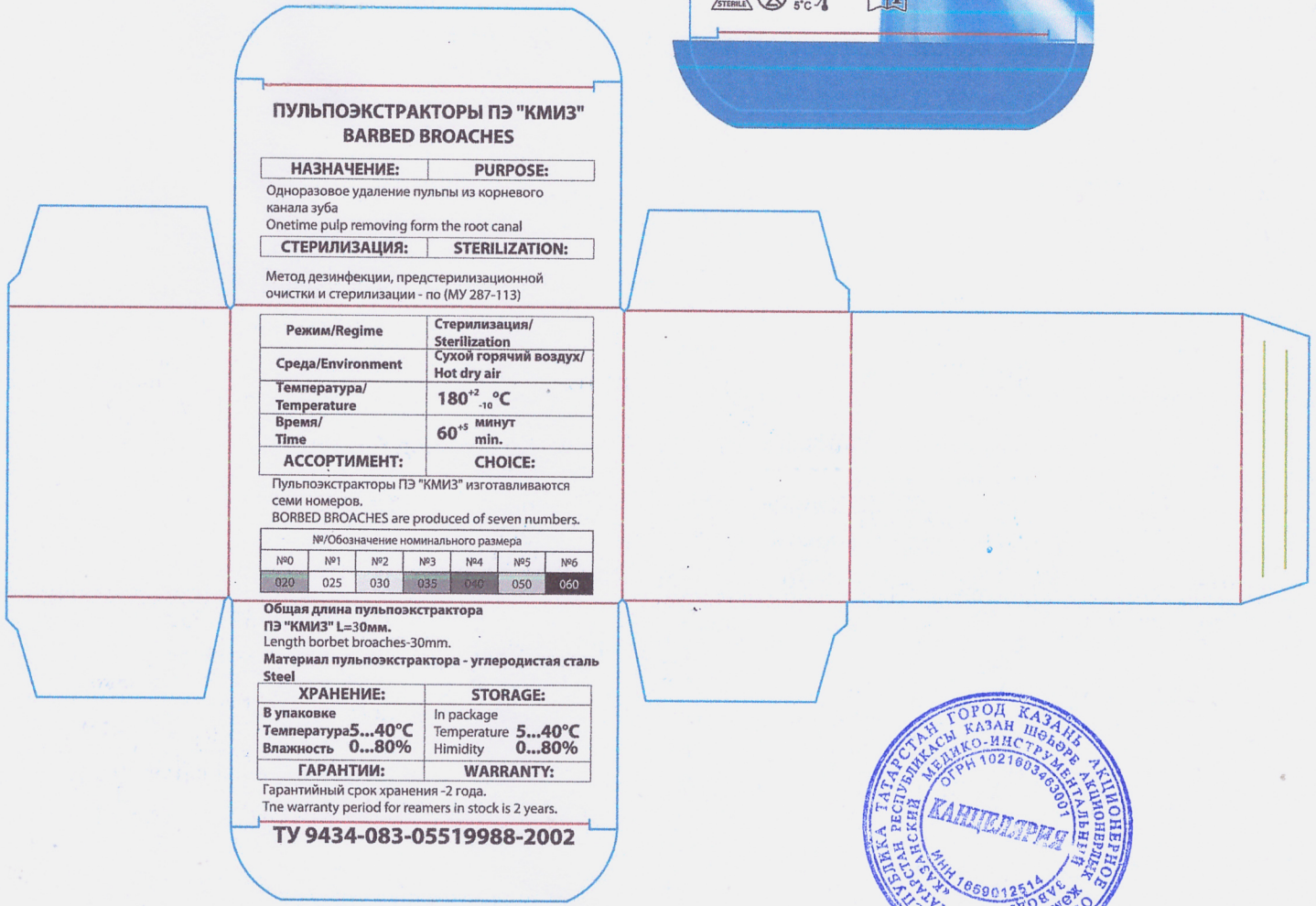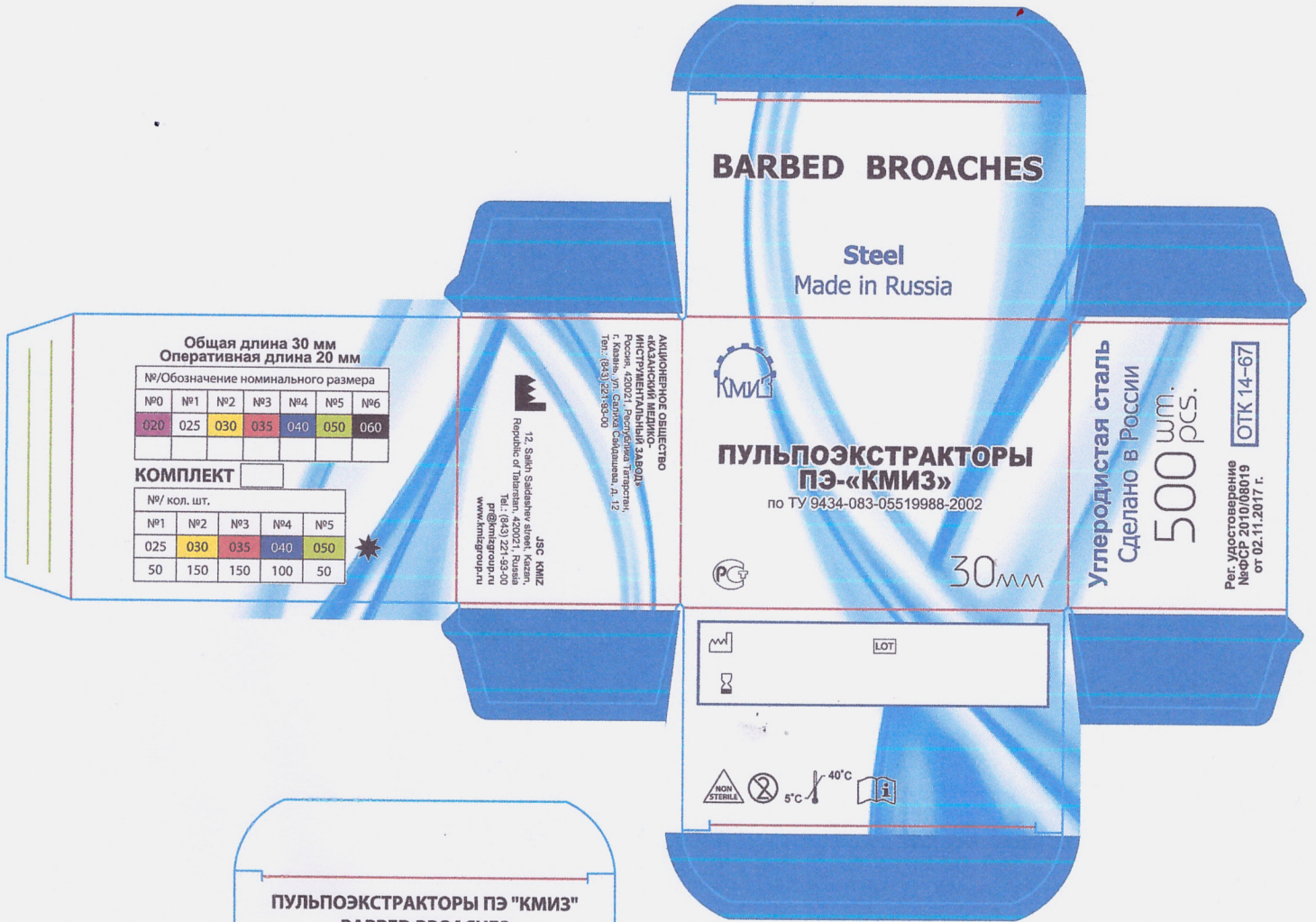

Handwritten signature and the number '170321'.