

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

В.П. Чуев

2018 г.



Версия/Version: № 4, 27.12.2018

 Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине tdvladmiva.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

комплекта пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения

«ДентЛайт»

по ТУ 9391-111-45814830-2007

увлажняющего агента

«ДентЛайт»-аква

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения «ДентЛайт» (**увлажняющий агент**) (далее по тексту – **увлажняющий агент «ДентЛайт»-аква**) предназначен для дополнительного увлажнения дентина перед нанесением гидрофильных адгезивных систем.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Увлажняющий агент «ДентЛайт»-аква представляет собой водный раствор гидроксиэтилметакрилата (НЭМА).

Увлажняющий агент «ДентЛайт»-аква сохраняет поверхность дентина увлажненной, препятствуя спаданию коллагеновых волокон и повышая их проницаемость для гидрофильных (ацетоно- или спиртосодержащих) адгезивных смол. **Увлажняющий агент «ДентЛайт»-аква** эффективно смачивает поверхность дентина и создает зону подавления кариеса в прилегающих тканях зуба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

1. Протравить дентин и эмаль в течение 15 сек гелем на основе 37%-ной ортофосфорной кислоты. Тщательно промыть обработанную поверхность водой в течение 5-10 сек и просушить воздухом в течение 5-7 сек. Поверхность должна быть сухой, но не пересушенной.

2. Отмерить в пластину с лунками 2 капли **увлажняющего агента «ДентЛайт»-аква**. Аппликатором нанести без избытка увлажняющий агент на подготовленную поверхность зуба и выдержать 20 сек.

3. Слегка подсушить **увлажняющий агент «ДентЛайт»-аква** воздушным потоком, чтобы удалить излишки материала. После обработки поверхность зуба должна быть глянцевой.

4. Нанести адгезив следуя инструкциям производителя.

ВНИМАНИЕ: *В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов следует отказаться от дальнейшего применения материала.*

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон-капельница)	- 5 мл
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск **увлажняющего агента «ДентЛайт»-аква** другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

Срок годности – 3 года.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.