

Временный закрывающий состав для полостей зубов



рис. 1

Область применения

Временное пломбирование полостей зубов.

Нанесение

Положить необходимое количество материала **Fermin** и с помощью инструмента для заполнения нанести непосредственно в полость (влажную/сухую) (рис.1); затвердевает примерно через 15 минут под действием слюны, беречь от воздействия жевательного давления ок. 1 часа. Выложенный материал не класть обратно в стеклянную баночку.



рис. 2

Удаление временной работы

По завершении данного этапа лечения **Fermin** удаляется из полости с помощью зонда или экскаватора (рис. 2).

Противопоказания

Fermin нельзя помещать непосредственно на пульпу. Для защиты пульпы уложить соответствующую прокладку, напр., препарат на основе гидроксида кальция.

Указание

- Нанесение должно производиться в асептических условиях.
- После нанесения цемента может возникнуть воспаление пульпы. Именно поэтому при работе в непосредственной близости от пульпы перед нанесением в полость **Fermin** необходимо наносить прокладку.
- Использовать только для стоматологических целей обученным персоналом.
- Принять во внимание данные паспорта безопасности материала!

Хранение

В плотно закрытом виде.

Пояснение символов

MD Медицинское изделие