



## **Dentapreg® BRAID Инструкция по применению** **АДГЕЗИВНЫЙ МОСТ В ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЕ ЗУБОВ**

- непрямая процедура

- 1) По оттиску приготовьте гипсовую модель и изолируйте ее.
- 2) Отмерьте необходимую длину ленты Dentapreg®.
- 3) Для защиты промежутка для чистки между телом моста и десной используйте матрицу или пластиковую пленку.
- 4) Нанесите тонкий слой композита C&B (приблизительно 0,5 мм) на участки адгезии. **ПОКА НЕ ОТВЕРЖДАЙТЕ СВЕТОМ!**
- 5) Извлеките ленту Dentapreg® BRAID из блистера и ножницами отрежьте на необходимую длину. Не прикасайтесь голыми руками к незащищенной ленте. Рекомендуется использовать неопудренные латексные или нитриловые перчатки. Уложите оставшуюся часть ленты в блистер и накройте ее прилагаемой светозащитной пленкой. Хранить в темном месте, желательно, в холодильнике. Допускается хранение в период до 2 недель без риска существенного ухудшения свойств ленты.
- 6) Снимите с ленты защитную бумагу пластиковую пленку. Вставьте ленту в неотвержденный композит и сформируйте до нужного положения. Лента в месте положения тела моста должна проходить по середине будущего тела моста в лингвально-лабиальном направлении. Для облегчения адаптации ленты можно использовать инструмент Dentapreg® Fork.
- 7) Выполните фотополимеризацию адаптированной ленты Dentapreg® из расчета 40 секунд на зуб. Для защиты остальной части ленты в процессе фотополимеризации можно использовать продукт Dentapreg® Shield.
- 8) Покройте всю ленту, включая межзубные промежутки, композитом C&B.
- 9) Выполните фотополимеризацию композита в соответствии с инструкциями производителя.
- 10) Создайте тело моста путем наложения слоев композита C&B в соответствии с инструкциями производителя. Сформируйте части дентина зуба, подобрав оттенок композита для дентина, Сформируйте части эмали зуба в соответствии с оттенками для эмали. Промежутки для чистки должны остаться свободными.
- 11) Выполните фотополимеризацию всего моста в соответствии с инструкциями производителя композита. Финишное отверждение также может быть выполнено в печи полимеризации.



- 12) Выполните финишную обработку моста, подгонку под прикус и полировку.



### Целевое применение

Данное медицинское изделие предназначено для изготовления временных и полупостоянных мостов в передней области зубов с применением не прямой процедуры.

### Состав

Продукты Dentapreg® BUNDLE, BRAID и VEIL:

Содержание мономера метакрилата: 40 - 50 вес. % в зависимости от типа изделия.

Содержание стекловолокна: 50 - 60 вес. % в зависимости от типа изделия.

Дополнительные ингредиенты: катализаторы и стабилизаторы.

### Предостережения

Надевайте защитные очки во время выполнения фотополимеризации.

Не используйте продукт Dentapreg®, если защитная упаковка повреждена.

Не используйте продукт Dentapreg® после указанной даты истечения срока годности.

### Противопоказания

Применение продуктов для фиксации Dentapreg® противопоказано у пациентов с известной аллергией на какой-либо из ингредиентов продуктов Dentapreg®.

### Рекомендации

- При обращении с лентой Dentapreg® настоятельно рекомендуем использовать неопудренные латексные или нитриловые перчатки.
- Лента Dentapreg® должна быть полностью покрыта композитом.
- Оптимальная толщина композита фасетки, который наносится на верхнюю часть волокнистой рамы в месте окклюзии, составляет 2 мм.
- Пригните ленту Dentapreg® как можно ближе к десне. Таким образом обеспечивается максимальный армирующий эффект моста в задней области.
- Рекомендуем использовать металлические инструменты, например, клещи и лопатку.
- При нанесении продукта Dentapreg® рекомендуем использовать композит C&B. В случае промежуточного или временного применения можно использовать жидкотекучий композит.

### Производитель и дистрибьютор

#### Производитель:

АДМ а.с., Ул. Водарны, 2, 616 00 Брно,  
Чешская Республика [www.dentapreg.com](http://www.dentapreg.com)

Дата пересмотра версии: Февраль, 2018 г.

ADM, a.s., 02/2018, ФОРМА: 180201



(подпись) штамп:

[АДМ а.с.,  
Ул. Водарны, 616 00 Брно,  
Чешская Республика  
Тел.: +420 733 187 111  
Факс: +420 541 143 067  
ИН: 607 42887 ИНН: CZ50742887]